


Corona Antigen-Rapid-Test Anleitung/ FLOWFLEX

1. Abholung der Testkits im kleinen Konferenzzimmer
2. Durchführung der Tests laut Anleitung
3. Testergebnisse fotografieren lassen
4. Abgabe der im Müllbeutel befindlichen gebrauchten Tests und der nicht verwendeten Tests im SEKRETARIAT

> Abendschule: Ungebrauchten Tests und Müll in Box im Konferenzzimmer hinterlegen, wenn Sekretariat geschlossen

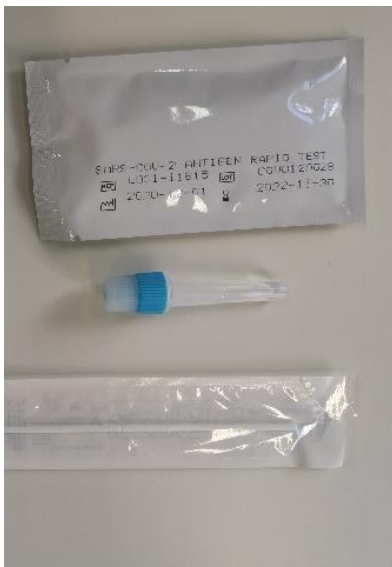

❶

Das Testkit enthält:

- Testkassetten
- Stäbchen
- Röhrchen mit Testflüssigkeiten
- Müllbeutel

Steht im kleinen Konferenzzimmer für die/den Lehrer/in zur Abholung bereit.

Lehrer/in geht mit den notwendigen Utensilien in die Klasse. Lehrer/in teilt die Testkits an die Schüler/innen aus.

❷

Schüler/in schreibt auf ein Blatt für das Foto:

| | |
|---------------|------------------|
| Nachname | (der Testperson) |
| Klasse | (der Testperson) |
| Datum | (heutiges) |
| Telefonnummer | (der Testperson) |

Nachname
Klasse
heutiges Datum
Telefonnummer



❸

Schüler/in öffnet die Verpackung des Teststäbchens und der Testkassette.

- ➔ Stäbchen herausnehmen
- ➔ Testkassette herausnehmen

Die Testkassette BLEIBT während des Tests auf dem Tisch liegen, daher NICHT aufheben!


Corona Antigen-Rapid-Test Anleitung/ FLOWFLEX

4

Schüler/in setzt Maske ab und fährt mit dem Stäbchen ins Nasenloch. Das Stäbchen wird 5 Mal pro Nasenloch gedreht. Danach die Maske wieder aufsetzen.

Es ist nicht notwendig das Stäbchen tief in die Nase einzuführen.

- 5x drehen im rechten Nasenloch
- 5x drehen im linken Nasenloch

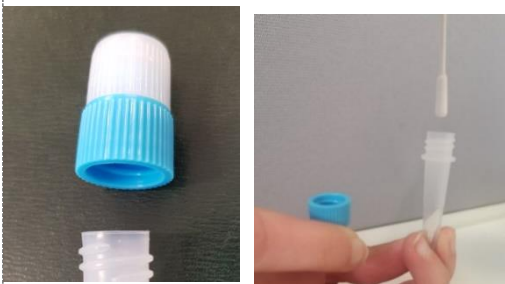

5

Schüler/in öffnet **OHNE ZU DRÜCKEN** das Röhrchen mit der Testflüssigkeit und steckt das Stäbchen in das Röhrchen.

Das Nasenabstrich-Stäbchen wird 30 Sekunden im Röhrchen umgerührt.

6

Schüler/in drückt danach das Röhrchen gemeinsam mit dem Stäbchen mindestens fünf Mal zusammen.



7

Schüler/in zieht das Stäbchen heraus und drückt währenddessen das Röhrchen.

Das Stäbchen wird zurück in die **VERPACKUNG** gelegt!


8

Schüler/in schraubt die Tropferspitze wieder fest auf das Röhrchen.

Das Röhrchen wird dann gründlich gemischt und gewirbelt.



Corona Antigen-Rapid-Test Anleitung/ FLOWFLEX

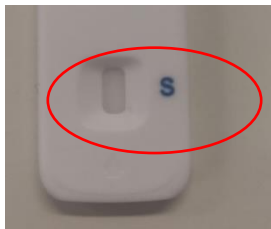


9

Schüler/in schraubt die kleine weiße Kappe der Tropferspitze ab.

VORSICHTIG und **LANGSAM** das Röhrchen nach unten drehen und 4 Tropfen in die Probekammer (S) eintropfen.

Das Röhrchen verschließen.

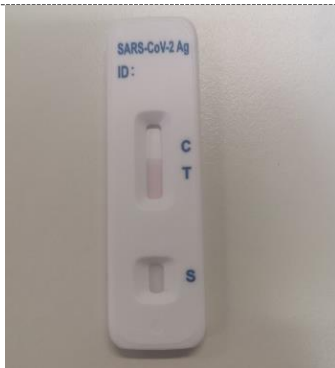

10

15 bis 30 Minuten warten!

Der Streifen läuft sofort rot an. Nach wenigen Minuten sollte man schon etwas erkennen können – nach ca. 15 Minuten ist das Testergebnis ersichtlich.

FERTIGES TESTERGEBNIS:



Bei positiven Testergebnis verständigt die/der Lehrer/in das Sekretariat (050 248 070) und die/der Schüler/in geht in die Isolierstation (Raum 2.40) und wartet auf die weiteren Anweisungen. (Anm.: vom Sekretariat werden die Gesundheitsbehörden informiert und die entsprechenden Anweisungen erteilt).

Nur für Abendschule: Studierende gehen nach Hause und verständigen die Gesundheitsbehörde bzw. 1450. Rückmeldung darüber an das Sekretariat per Mail.

Die Testkits werden in den Müllbeuteln gesammelt und gemeinsam mit den nicht gebrauchten Testkits im Sekretariat abgegeben (Für Abendschule: im kleinen Konferenzzimmer in die Box.)

**Schüler/in bzw. Studierende fotografieren mit dem Handy das Testergebnis gemeinsam mit dem Zettel (mit Namen, ...)
= Nachweis der negativen Testung für die nächsten 2 Tage!**